

Instructie voor de afname van genitaal materiaal bij vrouwen

Benodigdheden:

- e-swab (met een roze dop)
- speculum



Eswab (verkrijgbaar op het MMI)

Analysemonster

- vaginaal uitstrijk
- cervix uitstrijk

Aanvraag

De aanvraag voor het afnemen van materiaal voor onderzoek bij vrouwen wordt geregeld door de medisch specialist, huisarts of SOA-arts.

De aanvraag van dit onderzoek kan door de specialist in HIX gedaan worden.

Materiaal	Urogenitaal	
Herkomst	Urogenitaal - cervix	Aanvulling

Urogenitaal

Banale kweek

SOA pakket

zwangere (langdurig gebroken vliezen)

Gist

Treponema Pallidum PCR

HSV / VZV PCR

Omschrijving
Urogenitaal - cervix
Urogenitaal - IUD
Urogenitaal - labia
Urogenitaal - overig
Urogenitaal - penis
Urogenitaal - placenta
Urogenitaal - portio
Urogenitaal - urethra
Urogenitaal - vagina
Urogenitaal - vagina/perineum
Urogenitaal - vruchtwater
Urogenitaal - vulva
Urogenitaal-vagina/cervix

HIX ordenen


Let op bij zwangere:

Materiaal: Urogenitaal

Herkomst: vagina/perineum

Aanvraag: zwangere (langdurige gebroken vliezen)

De huisarts kan gebruik maken van het Adrz papieren aanvraagformulier voor medische microbiologie of ZorgDomein (digitale order omgeving voor huisartsen)

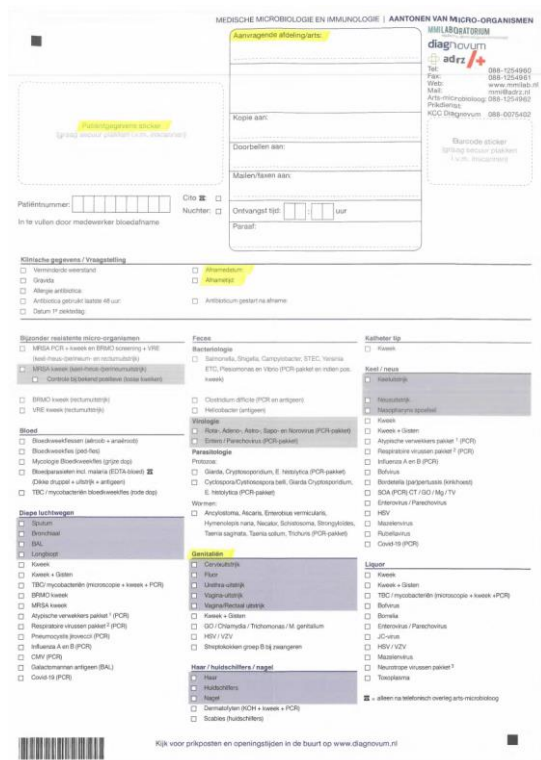

Adrz papieren aanvraagformulier medische microbiologie

Het monster moet voorzien worden met de naam en de geboortedatum van de patiënt (bij voorkeur m.b.v. een HIX order sticker of patiëntsticker). Vergeet de afname datum niet te vermelden. Bij voorkeur ook de klinische informatie invullen.


Afname voor kweek en/of PCR-onderzoek

Het SOAPPCR-onderzoek omvat Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis en Mycoplasma genitalium.

1. Voor zowel een *kweek* als *PCR-onderzoek* wordt de e-swab (met een roze dop) gebruikt.
2. Open de verpakking.

De wisser bovenaan vastpakken bij de afname van het monster en niet onder het rode streepje.

3. Het speculum inbrengen zodat de cervixopening zichtbaar wordt.
4. Het stokje enkele seconden in het endocervixkanaal ronddraaien.
5. Open het buisje en steek de wisser erin.
6. Breek de wisser af bij het breekpunt (= rode streep).
7. Draai de stop op het buisje tot deze goed gesloten is.
8. Noteer identificatiegegevens op het buisje (of plak een sticker).

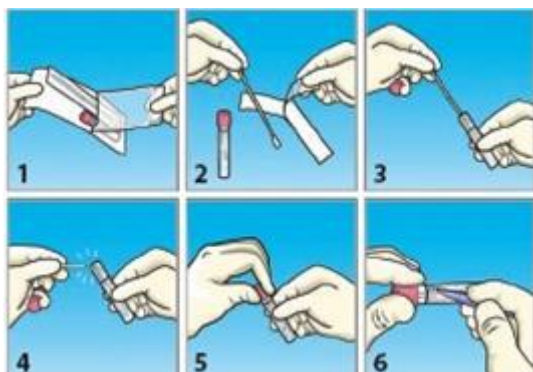

De uitstrijk wordt samen met een volledig ingevuld aanvraag(formulier) zo spoedig mogelijk naar het MMI gebracht. Meer informatie hierover is te vinden onder het kopje “Bewaar- en transportinstructies” onder het onderdeel “Informatie voor aanvragers” op onze website www.mmilab.nl.